



**JET BLUE® Bite**  
*Bite Registration Material*

## 咬合记录硅橡胶

获得国际牙科界权威测评机构Reality五星评价！  
更获得Dental Advisor “2008年最佳咬合材料” 至高荣誉！



 **瑞士康特齿科集团**  
Swiss Quality for Dentistry.



# 记录咬合 – 快速、精确

咬合记录是保证修复体精确性的关键步骤，而传统的蜡质材料存在冷却后产生温度形变、强度低、易断裂等诸多弊端。JET BLUE Bite 咬合记录硅橡胶的出现完美地解决了这一问题。它使得精密修复成为可能，牙医花费大量时间调改修复体将成为历史！

JET BLUE Bite带给您无与伦比的咬合精确性：

- 固化前具有奶油般的粘稠度—咬合无阻挡，不回弹
- 稳定在牙列上不会乱流
- 高度的形态稳定性—无变形
- 固化后如岩石般坚硬，肖氏A硬度高达89—保证精确性
- 柔韧性好—容易修整，不会断裂

## 直接法



将JET BLUE Bite直接注射在患者牙列的咬合面上。



理想的工作时间。



患者只需轻轻闭合即可将咬合情况精确记录。



最终的咬合记录。



容易切割。



容易打磨、修形。



特殊设计的鸭嘴型口内注射头使混合均匀的材料自动成为条带状。

**独有25ml微型系统包装，混合头材料浪费大大减少！**



JET BLUE BITE	工作时间	口内固化时间	终极硬度	形态稳定性
JET BLUE BITE fast	max. 30 s	min. 40 s	89 Shore A	-0,08%
JET BLUE BITE superfast	max. 20 s	min. 30 s	89 Shore A	-0,12%

## 订货信息：

6496	JET BLUE Bite fast 25ml 微型系统咬合记录硅橡胶大套装	
	弹药筒包装	8 × 25 ml
	混合头	20 个
	鸭嘴型口内注射头	20 个
6492	JET BLUE Bite fast 25ml 微型系统咬合记录硅橡胶小套装	
	弹药筒包装	2 × 25 ml
	混合头	10 个
	鸭嘴型口内注射头	10 个
6270	MKII 微型系统注射枪	1把
6215	微型系统混合头	100支
6223	鸭嘴型口内注射头	100支

6495	JET BLUE Bite fast 50ml 咬合记录硅橡胶大套装	
	弹药筒包装	4 × 50 ml
	混合头	12个
	鸭嘴型口内注射头	12个
6491	JET BLUE Bite fast 50ml 咬合记录硅橡胶小套装	
	弹药筒包装	1 × 50 ml
	混合头	6 个
	鸭嘴型口内注射头	6 个
6900	50/75 系统注射枪	1把
6551	混合头	40支
6223	鸭嘴型口内注射头	100支

## 授权代理商：

Coltene/Whaledent AG  
Feldwiesenstrasse 20  
CH-9450 Altstätten / Switzerland  
Tel. 0041/71/75 75 300  
Fax 0041/71/75 75 301  
E-mail: info@coltenewhaledent.ch

Coltene/Whaledent Inc.  
235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls, OH 44223 / U.S.A.  
Tel. 001/330/916 8800  
Fax 001/330/916 7077  
<http://www.coltenewhaledent.com>

瑞士康特齿科集团中国贸易公司  
北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼  
B座2单元1103-1104室 邮编：100044  
电话：(010) 62161985 62123251  
传真：(010) 62123252  
<http://www.cwchina.bj.cn>

**COLTENE®**