



美是永恒的主题

瑞士康特直接修复材料产品线
Coltene Restoratives/Adhesives

瑞士康特齿科集团

Contents/ 目录

复合树脂系列 ▶

——最简单的美学充填系统

- 002/SYNERGY® D6 纳米复合树脂
- 003/BRILLIANT NG “铂瑞” 通用双色纳米复合树脂
- 005/BRILLIANT Flow “铂瑞” 纳米流动树脂
- 005/SwissTec “斯泰” 光固化复合树脂

粘接剂系列 ▶

——超高抗剪切强度、真正的水基质

- 006/One coat 7.0 单组份强力粘接剂
- 007/One Coat Bond SE “一滴棒” 自酸蚀强力粘接剂
- 008/One Coat Bond “一滴棒” 全酸蚀强力粘接剂
- 009/SwissTec SL “斯泰” 全酸性粘接剂

树脂抛光系列 ▶

——金霸王，品质的保证

- 010/SwissFlex “飞扬” 抛光系统
- 011/Diatech “金霸王” 树脂抛光系列

口腔隔湿系列 ▶

——严格的原料选择，精密的加工工艺

- 013/Hygenic 齿科橡皮障
- 013/“露娜” 口腔隔湿棉卷 (Luna)
- 014/“乐宜口” 多功能弹性棉条 (Parotisroll)

辅助工具系列 ▶

- 014/树脂充填器
- 015/Roeko “乐宜口” 成形片
- 015/Roeko “乐宜口” 打磨抛光条
- 016/Hanel 咬合检查系列
- 016/Coltosol F “康妥” 暂封材
- 016/Coltolux LED 光固化灯

SYNERGY® D6 纳米复合树脂

——最简单的美学分层充填系统




独特的 SYNERGY® D6 比色板

Synergy D6® 的比色板完全由 Synergy D6® 复合树脂制作而成，保证最终的修复体和您选择的颜色完全匹配。将牙本质与牙釉质先分开比色，再合并在一起，即可完美再现修复体最终的色彩。




双色概念

每支牙本质树脂可以充填两种 Vita™ 色的牙齿。6 支牙本质色，2 支釉质色，仅需 8 支树脂即可完成所有的美学分层充填，简化操作的同时却能获得更好的充填效果。

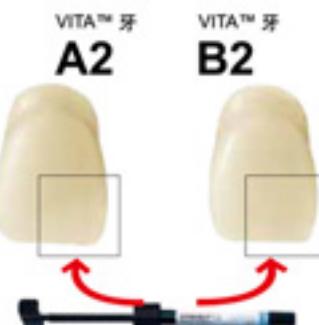

使用同一支 SYNERGY D6® A2/B2 双色纳米复合树脂，分别充填Vita比色板 A2牙和B2牙的IV类洞——获得完美的色彩融合！

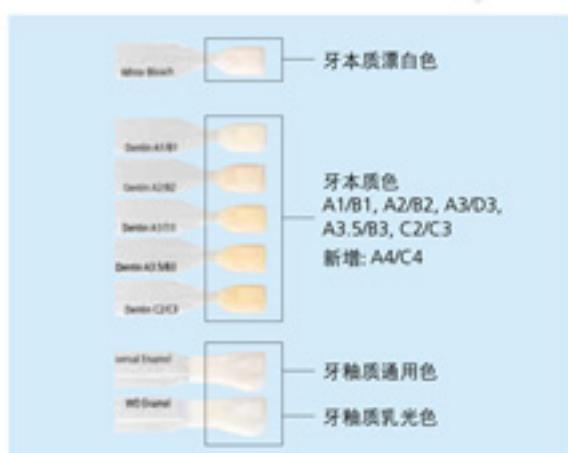

出众的可操作性

易于堆砌，稳定性高，不粘器械

在口腔内的温度下，具有良好空间稳定性的 SYNERGY D6® 直到光固化完成都能够维持形态。

下图为等量、不同品牌的复合树脂，在 37°C / 98°F 时，使用栅格压平。左侧照片是在 1 分钟之后拍摄所得。

1

优异的物理性能

技术数据

弹性模量	9000 MPa
挠曲强度	127 MPa
吸水率	16 µg/mm ³
溶解性	0.9 µg/mm ³
X线阻射性	2 mm Al
维氏硬度	73 kg/mm ²
聚合收缩	2.1%
压缩强度	392 MPa
最小填料直径	20 nm
平均填料直径	0.6 µm
填料重量比	80%
填料体积比	65%
密度	2.0 g/cm ³

快速、持久的光泽

出色的抛光性能

SYNERGY D6® 充填体可以在很短时间内被抛光并获得持久的光泽，这些得益于适宜的填料大小和分布。

持久的美学效果

SYNERGY D6® 可以充分满足日常的美观要求——保证了卓越、美观和经济的充填修复。



充填完成

订货信息

8362 SYNERGY D6® 纳米复合树脂初始套装

包含：8支(4g / 2ml)
牙本质：A1/B1, A2/B2, A3/D3,
A3.5/B3, C2/C3, 漂白色
牙釉质：通用色, 乳光色
SYENRGY “D6” 比色板1套
其它配件若干

SYNERGY D6® 纳米复合树脂补充装

- 8366 牙本质A1/B1
- 8367 牙本质A2/B2
- 8368 牙本质A3/D3
- 8369 牙本质A3.5/B3
- 8370 牙本质C2/C3
- 8384 牙本质A4/C4
- 8365 牙本质漂白色 (WB)
- 8371 牙釉质通用色
- 8372 牙釉质乳光色


BRILLIANT NG“铂瑞”通用双色纳米复合树脂 ——最经济的美学充填系统



与 Synergy D6® 一脉相承的色彩概念


每支树脂可以充填两种 Vita™ 色的牙齿。更多釉质色可供美学分层充填选择。

“铂瑞”双色比色板与Vita™比色板对比

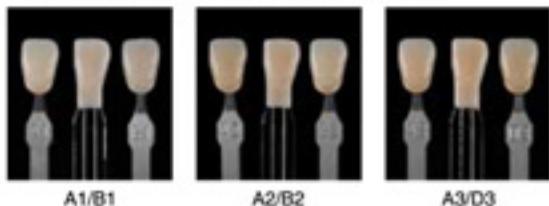


独特的比色板

采用“铂瑞”树脂制作的比色板，与相应色号的树脂聚合后的颜色完全一致独特的嵌套式设计，牙本质内核外覆盖釉质外壳。完美再现天然牙色彩的层次结构，明确修复体最终的色彩，同时展现透明、乳光等天然牙的特殊色彩效果。

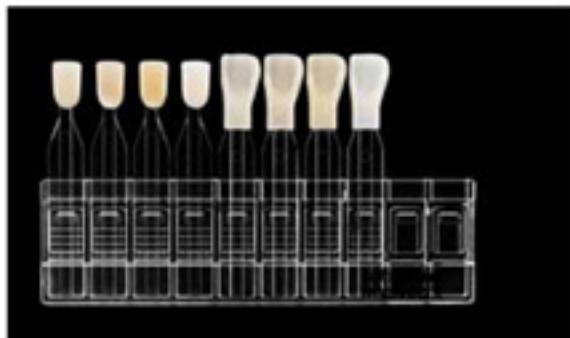

8色比色板：

牙本质色：A1 / B1, A2 / B2, A3 / D3 和漂白色
牙釉质色：A1 / B1, A2 / B2, A3 / D3 和漂白色

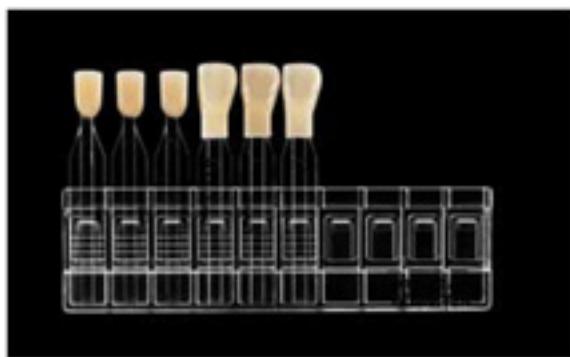

6色比色板：

牙本质色：A3.5 / B3, A4 / C4 和 C2 / C3
牙釉质色：A3.5 / B3, A4 / C4 和 C2 / C3

优异的机械性能，前后牙通用

既能满足前牙区对于美学的极高的要求，又能满足后牙对于树脂机械性能的要求。

技术数据

弹性模量	9000 MPa
挠曲强度	128MPa
吸水率	19µg/mm ³
溶解性	0.6 µg/mm ³
X线阻射	2 mm
磨耗率	2.58
维氏硬度	76 kg/mm ²
体积收缩率	2.2%
压缩强度	383 MPa
填料直径	0.6µm
填料直径范围	0.02-2.5µm
填料重量比	80%
填料体积比	65%

优异的操作性能

易于塑形，不粘器械。

最经济的美学充填系统


专为亚洲、南美洲设计的经济型美学树脂，性能不打折，价格更实惠。

特殊效果色—漂白色和透明色

特殊的病例，可使用特殊的效果色—牙本质漂白色、牙釉质白色和透明色，已达到更佳的美学效果。



病例展示

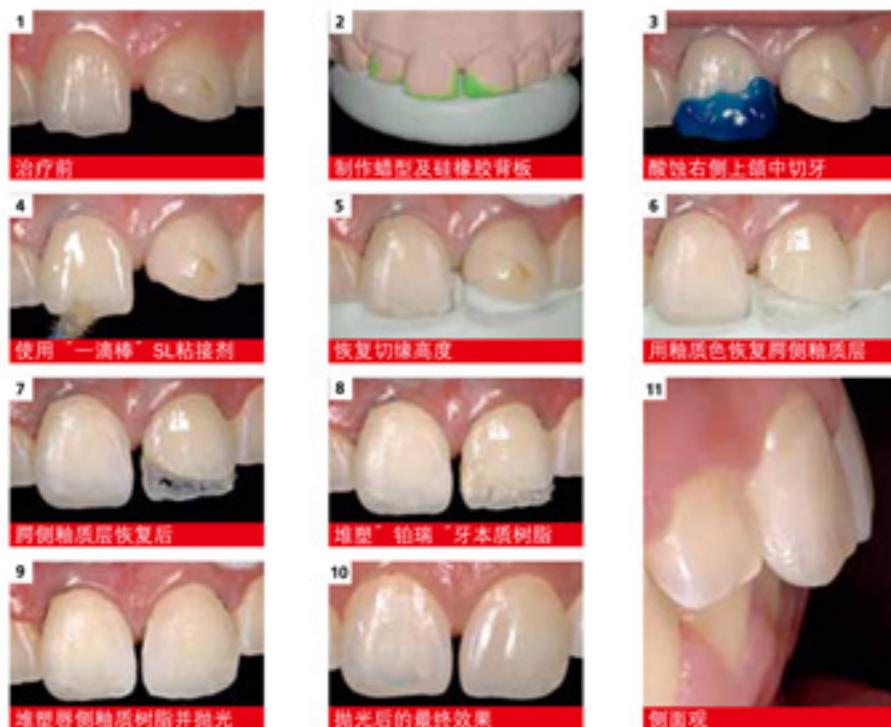

订货信息

8950 NG BrillAnt NG “铂瑞” 纳米复合树脂套装

包含:
牙本质色A1/B1、A2/B2、A3/D3 3×4g
牙釉质色A1/B1、A2/B2、A3/D3 3×4g
“一滴棒”SL自酸蚀强力粘接剂 1×5ml
酸蚀凝胶 1×2.5ml
“铂瑞”8色比色板 1个

BrillAnt NG “铂瑞” 纳米复合树脂补充装 (4g/支)

8951 NG	牙本质色 A1/B1
8952 NG	牙本质色 A2/B2
8953 NG	牙本质色 A3/D3
8954 NG	牙本质色 A3.5/B3
8955 NG	牙本质色 A4/C4
8956 NG	牙本质色 C2/C3
8957 NG	牙本质漂白色
8960 NG	牙釉质色 A1/B1
8961 NG	牙釉质色 A2/B2
8962 NG	牙釉质色 A3/D3
8963 NG	牙釉质色 A3.5/B3
8976 NG	牙釉质色 A4/C4
8964 NG	牙釉质色 C2/C3
8974 NG	牙釉质漂白色
8968 NG	透明色

8987 NG BRILLANT NG “铂瑞” 全色比色板

牙本质色: 漂白色、A1/B1、A2/B2、A3/D3、A3.5/B3、A4/C4、C2/C3
牙釉质色: 漂白色、A1/B1、A2/B2、A3/D3、A3.5/B3、A4/C4、C2/C3

8989 NG BRILLANT NG “铂瑞” 8色比色板

牙本质色: 漂白色、A1/B1、A2/B2、A3/D3
牙釉质色: 漂白色、A1/B1、A2/B2、A3/D3

8987 NG BRILLANT NG “铂瑞” 6色比色板

牙本质色: A3.5/B3、A4/C4、C2/C3
牙釉质色: A3.5/B3、A4/C4、C2/C3

BRILLIANT Flow “铂瑞” 纳米流动树脂



基于临床试验和成功科技研制而成，是一款纳米填料，高度 X 线阻射性和极小聚合收缩性的流动树脂。

双色概念

——每支树脂可覆盖两种 Vita™ 色

优异的操作性

——良好的流动性，易于塑形

订货信息

BRILLIANT New Line “铂瑞” 纳米流动树脂补充装 (2.3g/支)

- 7100 通用色A1/B1
- 7101 通用色A2/B2
- 7102 通用色A3/D3
- 7103 通用色A3.5/B3
- 7105 超白色
- 7106 透明色

SwissTec “斯泰” 光固化复合树脂



- 经济型树脂，前后牙通用；
- 优异的机械性能，抗磨耗性强；
- 卓越的操作性，不粘器械；
- 高度的可抛光性。

订货信息

5600 牙本质A1	5610 牙釉质A1	5607 超白色
5601 牙本质A2	5611 牙釉质A2	
5602 牙本质A3	5612 牙釉质A3	
5603 牙本质A3.5	5613 牙釉质A3.5	
5606 牙本质B1	5616 牙釉质B1	
5604 牙本质B2	5614 牙釉质B2	
5605 牙本质D3	5615 牙釉质D3	

One coat 7.0 单组份强力粘接剂

——第七代粘接剂

在任何界面，粘接轻松完成！



适应证

- 直接修复：用于复合树脂或复合体材料与牙釉质或牙本质的粘接
- 间接修复：用于复合树脂或陶瓷材料的修复体与牙釉质或牙本质的粘接
- 封闭牙本质小管

杰出的抗剪切强度

无论对于牙本质还是釉质，都具有超高的抗剪切强度。对牙本质的粘接强度超过同类产品平均水平35%，对切割后釉质超过20%

低挥发性配方！

不含高挥发性的丙酮基溶剂，不会因挥发影响粘接强度。

单组份，35秒快速完成粘接！



几乎没有术后敏感！



订货信息

7047 OneCoat 7.0 “一滴棒” 7.0单组份强力粘接剂初始套装

OneCoat 7.0 粘接剂	5 ml
黑色小毛刷	50 支
调和皿及盖子	各1个

7049 OneCoat 7.0 “一滴棒” 7.0单组份强力粘接剂补充装

OneCoat 7.0 粘接剂	5 ml
-----------------	------

7634 黑色小毛刷 50支

One Coat Bond SE “一滴棒”自酸蚀强力粘接剂

——第六代粘接剂

真正的水基质，操作敏感性低


真正的水基质光固化粘接剂。无论在干燥或潮湿的环境下都能充分发挥其强大的功能。




防止术后敏感

自酸性预处理剂 Primer1 能够使牙本质及牙釉质表面脱矿，同时溶解玷污层。不含任何挥发性有机溶剂成分的光固化粘接剂 Bond 2，透过胶原纤维网状结构渗入牙本质小管深处，形成了持久均一的混合层，可有效避免术后敏感。

超高的抗剪切强度

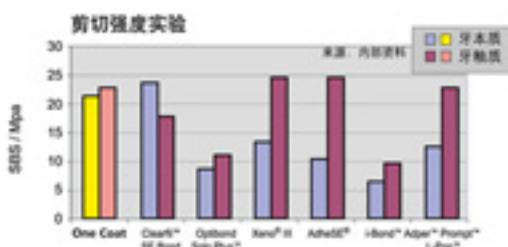

大量独立的权威临床测试和实验室研究均证实，One Coat “一滴棒”自酸蚀强力粘接剂对本牙质及牙釉质均有强大的抗剪切强度，足以确保修复体持久耐用。

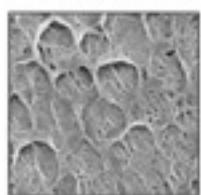


自酸蚀预处理剂 Primer 1 处理后的牙釉质



粘接剂 Bond 2 所形成的粘接界面与树脂突起


电镜图片来源：Prof. J. Perdigão, University of Minnesota, 美国

不同品牌粘接剂在牙本质上形成的粘接层的比较

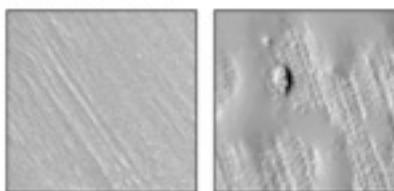


One Coat “一滴棒”
自酸蚀强力粘接剂

(牙釉质与牙本质都呈现均匀一致的粘接层)

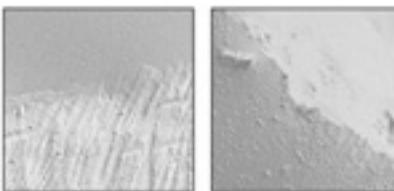

Clearfil TM SE Bond

Xeno[®] III

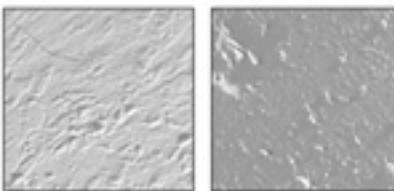

Adper TM Prompt
TM L-Pop TM

i-Bond TM

电镜图片来源：Interstate Institute for Technology, 瑞士

病例：



用黄色小毛刷蘸取粘接剂 Primer 1 涂擦20秒。



用气枪将预处理剂 Primer 1 针吹2秒，使其均匀。



用黑色小毛刷蘸取粘接剂 Bond 2 涂擦20秒。



用气枪将粘接剂 Bond 2 针吹2秒，使其均匀。



光照固化20秒（如光固化灯输出强度>800mW/cm²，固化时间可缩短至10秒）。

订货信息

7630 One Coat “一滴棒”自酸蚀强力粘接剂初始套装

预处理剂 Primer 1(黄色瓶)	5 ml
粘接剂 Bond 2(黑色瓶)	5 ml
黄色小刷	50支
黑色小刷	50支
回形盘	1个

7635 One Coat “一滴棒”自酸蚀强力粘接剂

预处理剂Primer 1补充装 5 ml

7636 One Coat “一滴棒”自酸蚀强力粘接剂

粘接剂 Bond 2补充装 5 ml

7633 黄色小刷补充装 50支

7634 黑色小刷补充装 50支

One Coat Bond “一滴棒”全酸蚀强力粘接剂

——第五代粘接剂

不含任何挥发性有机溶剂, 0% 丙酮, 0% 酒精!



超浓缩凝胶配方


常态下为凝胶状, 不滴落、不乱流, 可按量取材
不浪费; 揉搓时化为液态, 肉眼可辨涂布是否均匀。



无论在任何界面, 都具有强大的抗剪切强度

除用于复合树脂、复合体充填材料的粘接外, 还可用于复合树脂嵌体、高嵌体、贴面的粘著, 烤瓷贴面的粘著, 烤瓷修复体崩瓷的修补等。

“一滴棒”与不同材料的抗剪强度试验:

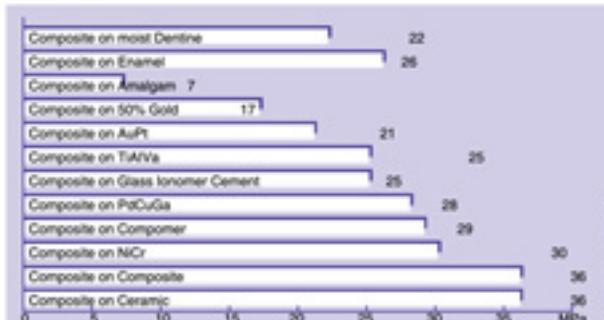

订货信息

7880 “一滴棒”强力通用粘接剂初始套装

Etchant 15 酸蚀剂	2 × 1.2ml
一滴棒强力通用粘接剂	1 × 1.2ml
粘接剂小毛刷	50支
粘接剂注射头	10支
酸蚀剂超细注射头	20支

7879 “一滴棒”强力通用粘接剂补充装 1 × 1.2 ml

7878 Etchant 15酸蚀剂补充装 4 × 1.2 ml

7873 “一滴棒”强力通用粘接剂补充装 2 × 1.2 ml (包含20支酸蚀剂超细注射头)

7877 粘接剂小毛刷 50支

7876 酸蚀剂超细注射头 20支

7874 粘接剂注射头 10支

SwissTec SL“斯泰”全酸蚀粘接剂




- 简单、快捷、更经济的选择；
- 不含任何挥发性配方，真正的水基质；
- 强大的抗剪切力；
- 有效防止术后敏感。

牙本质 / 牙釉质高强度粘接剂

“斯泰”牙本质 / 牙釉质粘接剂的亲水性配方，使它与牙体组织表面具有良好的亲和性，能够渗透至牙本质小管及胶原纤维网状结构中，粘接强度卓越。


V类洞轴壁微隙

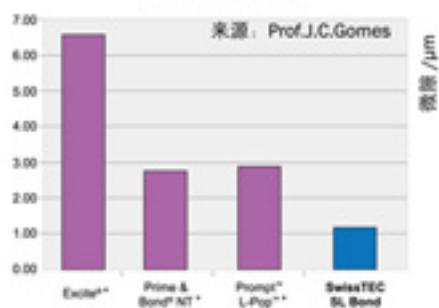

不含任何挥发性有机溶剂—均匀的粘接层

“斯泰”牙本质 / 牙釉质粘接剂与水完全亲和，无需任何挥发性有机溶剂作载体，大大减少了使用有机溶剂后经常引起的术后敏感。其组成成分均一，从开启到材料用完绝对不会挥发，确保了即使用到最后—滴，粘接效果仍然滴滴相同。

牙本质粘接强度的比较

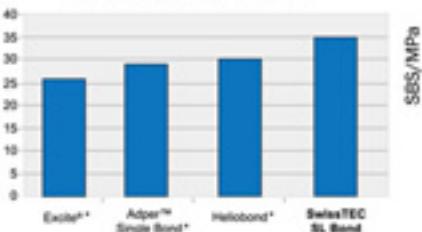

订货信息

5640 Swiss TEC SL Bond “斯泰”牙本质/牙釉质强力粘接剂

5ml × 1瓶

附带10支小毛刷

SwissFlex “飞扬” 抛光系统



1. 不随机轴滑动

操作便捷，更加高效

2. 完全覆盖机轴

机轴的中心由塑料制成，在抛光时可以有效防止磨损牙体组织，防止划伤和变色

3. 超薄盘片

贴近牙齿表面的理想形态。



4. 多种型号可供选择，适应证广泛

适用于复合树脂、银汞合金、玻璃离子水门汀、非贵金属和贵金属

订货信息

250095AA SwissFlex大套装

包含：直径13mm和9mm的8种型号抛光碟各25个，粗颗粒和中等颗粒抛光条、细颗粒和超细颗粒抛光条各20个，机轴3个。

250097AA SwissFlex小套装

包含：直径13mm的黑色抛光碟15个；
直径13mm的蓝色抛光碟15个；
直径13mm的红色抛光碟15个；
直径13mm的白色抛光碟15个；机轴1个。



订货号	232018AA	232019AA	232020AA	232021AA	232022AA	232023AA	232024AA	232025AA	232026AA
适应症	修形		打磨		抛光		细抛光		
描述	机轴	粗颗粒 (70um)	中颗粒 (50um)	细颗粒 (30um)	超细颗粒 (5um)				
直径 (mm)	13	9	13	9	13	9	13	9	
补充装内含	5	80	80	80	80	80	80	80	80

订货号	232016AA			232017AA		
适应症	修形		打磨		抛光	
描述	粗颗粒 (70um)	中颗粒 (50um)	细颗粒 (30um)	超细颗粒 (5um)		
长 (mm)	175		175			
宽 (mm)	3.5		3.5			
补充装内含	80		80			

Diatech“金霸王”树脂抛光系列

树脂预备、抛光套装

250059AA

套装由 12 支不同粒度的金刚砂车针、2 个硅橡胶抛光轮和 1 个抛光刷组成。



200079	200086	200096	200435	200453	200203	200540	200010	200029	200446	200452	200539	257 522		
Fig. No. ISO ø 1/10 mm Head L mm / Grain	801 010 ML	801 016 ML	801 023 ML	856 016 7ML	856 021 9ML	835 010 4ML	862 010 8ML	368 020 5F	379 016 3.5F	856 018 8F	856 021 9F	862 010 8F	2101RA 030 7	7002RA 040 7
Grit Size	125 μm	125 μm	125 μm	125 μm	125 μm	125 μm	125 μm	45 μm	45 μm	45 μm	45 μm	x 2	x 1	

两步法树脂抛光套装普通版

250014AA

两步法完成树脂表面抛光，多种形态适合各种表面的需求。

可高温蒸汽灭菌。



2101RA 030	2103RA 050	2111RA 060	2127RA 100	2201RA 030	2203RA 050	2211RA 060	2227RA 100
Fig. No. ISO ø 1/10 mm Head L mm / Grain							
Grit Size	x 2	x 1	x 2	x 2	x 2	x 2	x 2

两步法树脂抛光套装升级版

250092AA

两步法完成树脂表面抛光，多种形态适合各种表面的需求。

效率更高、效果更佳、使用寿命更长！

可高温蒸汽灭菌。



2301RA 030	2303RA 040	2311RA 060	2327RA 100	2401RA 030	2403RA 040	2411RA 060	2427RA 100
Fig. No. ISO ø 1/10 mm Head L mm / Grain							
Grit Size	x 2	x 1	x 2	x 2	x 2	x 2	x 2

一步法树脂抛光套装

250093AA

只需一步，轻松完成树脂表面抛光。

内含釉质金刚砂颗粒，使用加压的方法可完成初步抛光，减小压力，将获得镜面般的精细抛光效果。

使用最少的器械，最简单的步骤，达到最佳的抛光效果，经久耐用。

可高温蒸汽灭菌。



9101RA 030	9103RA 040	9111RA 060	9121RA 100	
Fig. No. ISO ø 1/10 mm Head L mm / Grain				
Grit Size	x 2	x 1	x 2	x 2

抛光刷套装

250047AA

DIATECH 抛光刷直接融入了细粒度的金刚砂抛光颗粒。无需抛光膏，开启了修复体抛光的新时代。刷状结构更贴合修复体表面，三种型号适合各种修复体表面形态的抛光，比抛光杯更灵活，更能达到邻间隙、窝沟等不易进入的部位，可高温蒸汽灭菌。



Fig. No.
ISO Ø 1/10 mm
Head L mm / Grain
Grit Size

7001RA
080
5
x27002RA
040
7
x17003RA
040
7
x2

微创预备套装

250027AA

由国际知名修复专家精选，由3支金钢砂车针和3支钨钢车针组成。


每支车针的工作头均在1mm以内，最大限度减少了牙体预备带来的创伤，保留健康牙体组织。

车针设计独特，细长的柄部加更小工作头的外形，有利于深入细小的潜行性龋损，以微创的方式去净龋坏组织，并为牙体预备提供视清晰的视野，并方便在显微镜下的精细操作。

工作头形态包括球形、梨形和火焰型，适合多种微创预备的要求。



Fig. No.
ISO Ø 1/10 mm
Head L mm / Grit
Grit Size


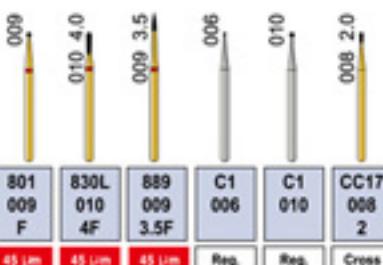
801
009
F
45 μm830L
010
4F
45 μm889
009
3.5F
45 μmC1
006
Reg.C1
010
Reg.CC17
008
2.0
Cross

钨钢抛光车针

“金霸王”12刃抛光车针及30刃精修车针，用于复合树脂等修复体的表面抛光，比金刚砂车针更高效，用最短的时间可以获得更光滑的表面和更好的光泽。


C13X
C46

Fig. No.
ISO Ø 1/10 mm
Head L mm
订货数量

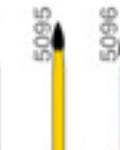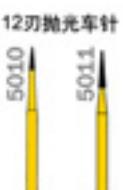

CF135
CF246

Fig. No.
ISO Ø 1/10 mm
Head L mm
订货数量

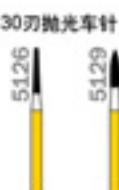

CF135
014
8.5XF
CF246
014
5.5XF

Hygenic 齿科橡皮障



- 全球市场占有率名列前茅的经典隔湿工具，助您高效完成治疗工作；
- 多种类型橡皮障布可供选择，弹性极佳；
- 配套工具种类齐全，使用方便。

订货信息

H02778 Hygenic 橡皮障初始套装

内含：橡皮障打孔器1把，橡皮障夹钳1把，Fiesta彩色标记哑光翼状橡皮障夹套装1盒（9个/盒）
6' × 6' 中等厚度，绿色乳胶橡皮障36张，
6' 橡皮障支架1个，中号楔线1盒，模板1个，以及操作说明书。

H11624 5' × 5' 超弹橡皮障补充装 52张/盒

H11625 6' × 6' 超弹橡皮障补充装 36张/盒

H09945 6' × 6' FlexiDam 高弹性非乳胶橡皮障

H09966 Hygenic 彩色标记哑光翼状橡皮障夹套装

包括：9种不同形态翼状橡皮障夹（#2、#2A、#4、#7、#8A、#9、#12A、#13A、#14A，各1个），金属制橡皮障夹固定底座1个。

Hygenic Fiesta 彩色标记哑光翼状橡皮障夹补充装

H09957 #2	（棕色标）通用型下颌前磨牙夹
H09958 #2A	（绿色标）通用型上颌前磨牙夹
H09959 #4	（橙色标）小号上颌磨牙夹
H09960 #7	（蓝色标）通用型下颌磨牙夹
H09961 #8A	（黑色标）适用于小的、部分萌出或形状不规则的磨牙
H09962 #9	（红色标）通用型上、下颌前牙夹
H09963 #12A	（黄色标）右下颌磨牙夹
H09964 #13A	（紫色标）左下颌磨牙夹
H09965 #14A	（蓝色标）适用于部分萌出或形状不规则的磨牙

H09956 Fiesta 彩色标记橡皮障夹固定底座

H02701 Hygenic 普通橡皮障夹套装

内含：9种翼状橡皮障夹（#1、#2、#4、#7、#8A、#9、#12A、#13A、#14A）各1个。

Hygenic 普通橡皮障夹补充装

H02762 #00

H02761 #2

H05689 #3

H02758 #7

H02759 #8A

H02706 #12A

H05690 #14

Wedjets 橡皮障固定模线

H06523 粗（橙色） 2.3m/盒

H06522 细（黄色） 2.3m/盒

H08040 超细（蓝色） 2.3m/盒

H01251 Hygenic 橡皮障打孔器

H01252 Hygenic 橡皮障夹钳

塑料制橡皮障支架

H01414 6' /152mm

H01416 5' /127mm

金属制橡皮障支架

H07083 6' /152mm

H07082 5' /127mm

H01415 橡皮障口巾 50张/盒

Luna“露娜”口腔隔湿棉卷




- 质地紧密，吸唾量大，无需频繁更换。
- 不易变形和脱落，能有效撑起颊部。
- 型号齐全，不经氯漂。

订货信息

“露娜”口腔隔湿棉卷	500个/包
105 001 1#	
105 003 2#	
105 002 3#	
“露娜”儿童用口腔隔湿棉卷	200个/包
100 032 2#	

Roeko“乐宜口”多功能弹性棉条 (Parotisroll)

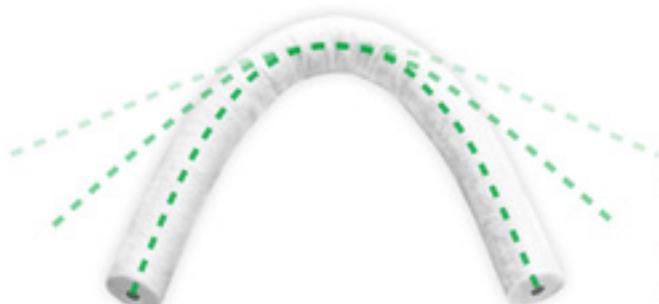

- 含纤细塑料内芯，有弹性，可预弯，能有效撑开唇颊部，保持开口位和舌后退位。
- 吸唾量大，可通过压迫唾液腺抑制其分泌。
- 型号齐全，不经氯漂。

订货信息

“乐宜口”多功能弹性棉条	100个/包
160 001 1# 长80 mm 直径9 mm	
160 002 2# 长80 mm 直径10 mm	
160 003 3# 长100 mm 直径10 mm	
160 005 5# 长100 mm 直径8 mm	
“乐宜口”解剖型多功能弹性棉条	50个/包
160 013 长100 mm 直径10 mm	
“乐宜口”弹性棉条弹出盒	1个
162 100 11,2 × 10,3 × 8,2 cm	

“乐宜口”口腔棉卷弹出盒	1个
120 004 白色塑料 134 × 100 × 48 mm	
120 005 不锈钢制 134 × 100 × 43,5 mm	

适用于标准长度 (36-40mm) 的1-3号棉卷。Luna儿童用口腔隔湿棉卷不适用。

“乐宜口”棉卷储存盒	1个
120 000 白色塑料 52 × 106 × 100 mm	

适用于标准长度 (36-40mm) 的1-4号棉卷及Luna儿童用口腔隔湿棉卷不适用。

树脂充填器



高质量不锈钢制造，外有氮化钛镀层，不粘材料，不会出现“黑点”现象，造型精制美观，经久耐用。

订货信息

7930 Brilliant Instrument 复合树脂充填器械套装

包含：6支临床常用形态充填器械

复合树脂充填器（单支包装）

- | | |
|------|------------|
| 7932 | 小号成形充填器 |
| 7933 | 中号成形充填器 |
| 7934 | 大号弯曲充填器 |
| 7935 | 橄榄形头充填器 |
| 7936 | 圆头/球星加压充填器 |
| 7937 | 平头加压充填器 |

Roeko“乐宜口”成形片



不锈钢及聚酯薄膜制成，与牙体贴合性好，能形成良好的接触点，多种型号。

订货信息

软型不锈钢成型片 3m/盒

- | | |
|---------|-------|
| 591 505 | 宽度5mm |
| 591 506 | 宽度6mm |
| 591 507 | 宽度7mm |

不锈钢成型片 3m/盒

- | | |
|---------|-------|
| 590 305 | 宽度5mm |
| 590 306 | 宽度6mm |
| 590 307 | 宽度7mm |

不锈钢成型片（厚度为0.05mm） 3m/盒

- | | |
|---------|-------|
| 590 505 | 宽度5mm |
| 590 506 | 宽度6mm |
| 590 507 | 宽度7mm |

600 009 聚酯薄膜成型片（宽度9mm） 15米/盒

Roeko“乐宜口”打磨抛光条



用于牙间隙的分离和打磨抛光，单面设计不损伤邻牙，多种型号。

订货信息

分牙钢砂条	12片/包
570 004 宽度4mm	
570 006 宽度6mm	
570 008 宽度8mm	
研磨钢砂条	10米/盒
560 040 40目	
560 060 60目	
560 030 抛光砂条 (30目)	10米/盒

Hanel 咬合检查系列



用于咬合检查，由纸、绢、箔等多种材质制成，型号齐全，满足现代咬合学的要求。抗撕拉力强，咬合印记精确，颜料无毒。

订货信息

480 392 长条形咬合纸 (200μm) 红色	300条/盒
480 384 长条形咬合纸 (80μm) 红蓝色	144条/盒
480 207 咬合绢 (80μm) 蓝色宽22mm	10m/卷
480 332 马蹄型咬合纸 (40μm) 双面红色	72条/盒
480 327 成卷长条型咬合纸 (40μm) 蓝色	15m/卷
480 352 长条型咬合纸 (40μm) 红色	120条/盒
480 042 咬合箔 (12μm) 红色宽22mm	25m/卷
480 165 咬合箔 (12μm) 黑色宽22mm	25m/卷
480 180 金属咬合箔 (8μm) 宽8mm	5m/卷

(更多型号参见瑞士康特网站)

Coltosol F “康妥”暂封材



- 无需调拌，直接使用；
- 不含丁香酚，不会阻碍树脂聚合反应；
- 遇唾液即硬固，边缘封闭性好，抗咬合强度高，可大块去除；
- 释氟，X线阻射。

订货信息

5906 Coltosol “康妥”暂封材（瓶装）

38g × 1瓶

Coltolux LED 光固化灯



- 光照强度达 1000mW/cm² 以上，对常规光敏材料均可 10 秒快速固化；
- 无绳设计的笔式手柄，形态纤巧，可轻松照射到后牙区域；
- 超大容量锂电池，一次充满可光照 350 次以上；
- 每 10 秒会有报时提示音，如连续光照 4-6 分钟将启用过热保护装置。

订货信息

C7970 Coltolux LED 光固化灯

包括：手柄、充电器底座、电源各1个，遮光罩3个，拱形光透镜2个，手柄隔离套100个。

C7975 光固灯手柄补充装

C7922 充电器底座补充装

C7973 电源补充装

C7974 拱形光透镜补充装 25个

C7957 光固灯手柄隔离套补充装 1000个

C7944 遮光罩补充装 100个

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten / Switzerland
Tel. 0041/71/75 75 300
Fax 0041/71/75 75 301
E-mail: info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, OH 44223 / U.S.A.
Tel. 001/330/916 8800
Fax 001/330/916 7077
E-mail: info.us@coltene.com

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstrasse 30
D-89129 Langenau Germany
Tel. 0049/73/45 805 0
Fax 0049/73/45 805 201
E-mail: info.de@coltene.com

www.coltene.com

瑞士康特齿科集团中国贸易公司
北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼
B座2单元1103-1104室 邮编: 100044
电话: (010) 62161985 62123251
传真: (010) 62123252
E-mail: china@coltenewhaledent.com
www.coltenewhaledent.bj.cn

授权代理商:

 **COLTENE®**