




 **HYGENIC  
DENTALDAM**

## 世界知名的专业齿科橡皮障

齿科橡皮障

临床治疗成功的有力保障！

 瑞士康特齿科集团



# 使用齿科橡皮障, 能给牙医师带来...

## 大大提高临床治疗效果


- 卓越的隔湿效果
- 清晰的手术视野
- 节省治疗时间



根管治疗时, 可获得极佳的视野和操作进路。

## 理想的保护作用

- 防止患者误吞、误咽异物
- 保护患者软组织免受刺激性冲洗液的伤害
- 隔离血液和唾液飞溅, 防止交叉感染

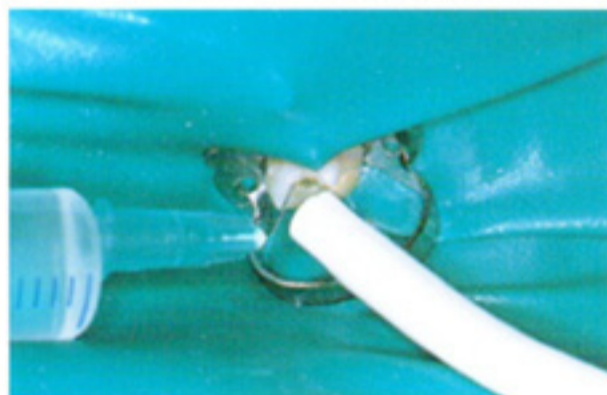

保护患者免受刺激性液体的伤害。

## 适应证

- 根管治疗
- 树脂粘接
- 水门汀粘固
- 儿童牙科
- 固定义齿修复



橡皮障甚至可用于龈下预备。



首先使用橡皮障定位模板在橡皮布上作好牙位标记, 将橡皮布绷在 Hygenic<sup>®</sup> 橡皮障支架上。转动橡皮障打孔器的孔位圆盘选择适当大小的孔位, 然后在预先标记好的位置上打孔。



用手或者橡皮障夹钳将有翼橡皮障夹安放在橡皮布上。



将橡皮障夹连同支架一起就位, 操作简便。



Wedjets<sup>®</sup> 固定楔线同样可以提供可靠、简便的固位。

其实, 安放橡皮障只需花费很少的时间...

# HYGENIC<sup>®</sup>：全球专业的齿科橡皮障品牌。 系列最完整、品种最全面。



## 橡皮障

提供不同尺寸、颜色和厚度的天然乳胶、非乳胶橡皮障，弹性高、抗撕拉力强，满足牙医的不同治疗需求。



另有 FlexiDam 超高弹性非乳胶橡皮障。水果口味，患者感觉更为舒适，尤其适合对乳胶过敏的人群。



## 橡皮障支架

有U型塑料制、金属制和椭圆形塑料制3种类型，均可高压蒸汽灭菌。塑料支架X线透射，拍摄牙片时不用取下。



## 橡皮障打孔器

镀铬碳钢制，坚固耐用。对于任何规格的橡皮布均能打出清晰的孔洞。共有5个孔位，分别适合不同牙位。



## 橡皮障定位模板

用于在橡皮布上准确标记牙位，分为上颌和下颌。



## 橡皮障夹钳

高品质不锈钢制，哑光表面防止光线反射。重量轻，特殊设计的钳喙弧度不会阻挡视线，可以非常快速地将橡皮障夹准确就位于患者口中。



## Wedjets<sup>®</sup> 橡皮障固定楔线

在很多情况下可作为传统橡皮障夹的替代品。弹性极佳，有粗、细、超细3种规格，能够快速、简便地固定橡皮障。



## 不锈钢橡皮障夹

有哑光和抛光两种，型号齐全，适用于不同牙位；经久耐用；颜色标记易于识别不同型号；哑光表面有效减少灯光反射。



## 橡皮障口巾

放置在橡皮布下方，使患者感觉更为舒适，同时能够吸收流出的水分。



## 订购信息:

### H02778 Hygenic 橡皮障初始套装

包括: 橡皮障打孔器1把, 橡皮障夹钳1把, Fiesta 彩色标记哑光翼状橡皮障夹套装1盒(9个/盒), 6" x 6"中等厚度, 绿色乳胶橡皮障36张, 6"橡皮障支架1个, 中号楔线1盒, 模板1个, 以及操作说明书。

H02142 5" x 5" 橡皮障补充装 52张/盒, 中等厚度, 绿色。

H02147 6" x 6" 橡皮障补充装 36张/盒, 中等厚度, 绿色。

H09945 6" x 6" FlexiDam 高弹性非乳胶橡皮障补充装 30张/盒, 紫色。

### H09966 Hygenic Fiesta 彩色标记哑光翼状橡皮障夹套装

包括: 9种不同形态翼状橡皮障夹(≠2, ≠2A, ≠4, ≠7, ≠8A, ≠9, ≠12A, ≠13A, ≠14A各1个), 金属制橡皮障夹固定底座1个。

### Hygenic Fiesta 彩色标记哑光翼状橡皮障夹补充装

- H09957 ≠2 (棕色标) 通用型下颌前磨牙夹
- H09958 ≠2A (绿色标) 通用型上颌前磨牙夹
- H09959 ≠4 (橙色标) 小号上颌磨牙夹
- H09960 ≠7 (蓝色标) 通用型下颌磨牙夹
- H09961 ≠8A (黑色标) 适用于小的、部分萌出或形状不规则的磨牙
- H09962 ≠9 (红色标) 通用型上、下颌前牙夹
- H09963 ≠12A (黄色标) 右下颌磨牙夹
- H09964 ≠13A (紫色标) 左下颌磨牙夹
- H09965 ≠14A (蓝色标) 适用于部分萌出或形状不规则的磨牙

H09956 Fiesta 彩色标记橡皮障夹固定底座

### H02701 Hygenic 普通橡皮障夹套装

含9种翼状橡皮障夹(≠1, ≠2, ≠4, ≠7, ≠8A, ≠9, ≠12A, ≠13A, ≠14A)各一个。

### Hygenic 普通橡皮障夹补充装

- |             |             |
|-------------|-------------|
| H02762 ≠00  | H02703 ≠1   |
| H02761 ≠2   | H05688 ≠2A  |
| H05689 ≠3   | H02704 ≠4   |
| H02758 ≠7   | H02760 ≠8   |
| H02759 ≠8A  | H02763 ≠9   |
| H02706 ≠12A | H02705 ≠13A |
| H05690 ≠14  | H02727 ≠14A |

### Wedjets 橡皮障固定楔线

- |               |        |
|---------------|--------|
| H06523 粗(橙色)  | 2.3m/盒 |
| H06522 细(黄色)  | 2.3m/盒 |
| H08040 超细(蓝色) | 2.3m/盒 |

### H01251 Hygenic 橡皮障打孔器

### H01252 Hygenic 橡皮障夹钳

### 塑料制橡皮障支架

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| H01414 6"/152mm | H01416 5"/127mm |
|-----------------|-----------------|

### 金属制橡皮障支架

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| H07083 6"/152mm | H07082 5"/127mm |
|-----------------|-----------------|

H01415 橡皮障口巾 50张/盒

Coltene/Whaledent AG  
Feldwiesenstrasse 20  
CH-9450 Altstätten/ Switzerland  
Tel. 0041/71/75 75 300  
Fax 0041/71/75 75 301  
E-mail: info.ch@coltene.com

Coltene/Whaledent Inc.  
235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls, OH 44223/ U.S.A.  
Tel. 001/330/916 8800  
Fax 001/330/916 7077  
E-mail: info.us@coltene.com

瑞士康特齿科集团中国贸易公司  
北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼  
B座2单元1103-1104室 邮编: 100044  
电话: (010) 62161985 62123251  
传真: (010) 62123252  
http://www.cwchina.bj.cn

## 授权代理商:

