



Cool Temp[®]
N A T U R A L

Automix temporary crown and bridge material

自动调拌暂时冠 / 桥材料

给你 “酷” 的感觉



瑞士康特齿科集团 
Swiss Quality for Dentistry.

让病人感觉很“酷”

Cool Temp Natural 的固化过程产热很低，不会刺激牙髓造成不适的感觉。而水/粉混合的自凝树脂，在固化时大量产热、收缩过多，同时产生强烈的、令人不快的气味和味道。使用 Cool Temp Natural 操作简便，大大节省了诊疗时间。


让医师感觉很“酷”

使用 Cool Temp Natural 制作暂时冠/桥，无需过多修整便可得到精密的暂时修复体。材料具理想的弹性期，能在口内短时间固化后轻松取出。表面的氧抑层易于清除，最后的修形、抛光也毫不费力。

操作起来很“酷”的自动调拌系统

Cool Temp Natural 装在可自动混合的“弹药筒”中，适用于 1:1/1:2 的标准型注射枪。其混合头细小，最大程度减少了材料浪费。操作简便、省时、杜绝杂乱，并确保材料混合均匀一致。


几种暂时冠 / 桥材料：口内停留时间

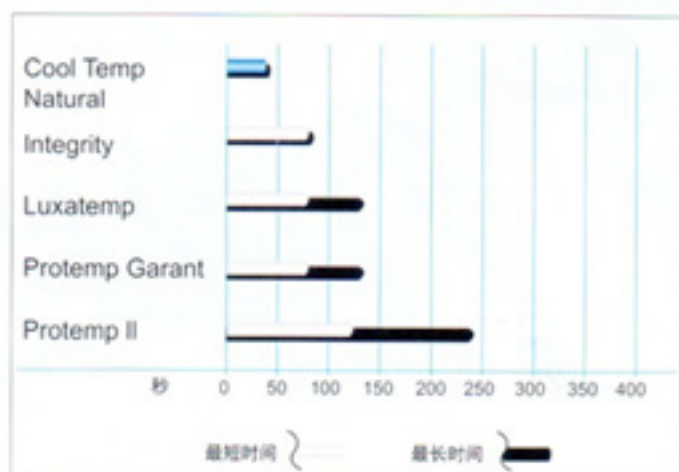

其它特点

- ※ 易于修形和抛光
- ※ 高强度
- ※ 高美观性
- ※ 愉悦的工作过程
- ※ 材料固化时间短

几种暂时冠 / 桥材料：固化时间

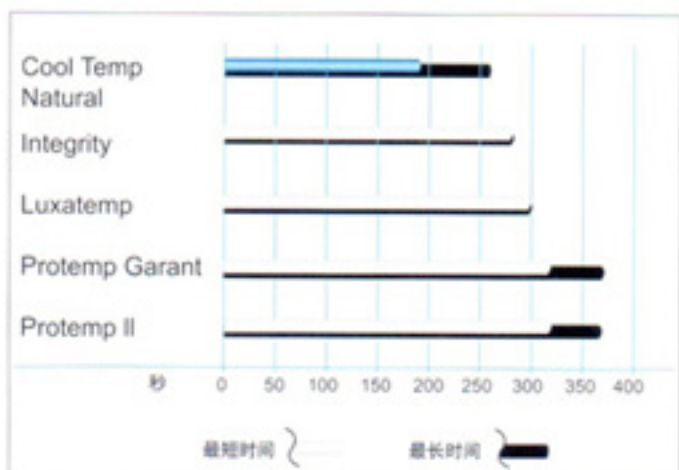

桥材料



操作步骤:

在牙体预备前先取印模，再按照需要预备牙体。

将Cool Temp Natural注入初印模中，戴入口内至预备好的牙体上。(35秒内完成)

在口内停留30-45秒后，材料处于弹性期，能方便地将带有暂时修复体的初印模从口内取出。



实用提示:

如需更容易地从口内取出带有暂时修复体的印模，建议在预备好的牙体上先喷涂Coltène口内分离剂，再将Cool Temp Natural材料就位。

等待3-4分钟后，将暂时修复体从初印模或预备体上取下，用酒精去除氧抑层，再进行细部修形和抛光。

易于修整:

用SYNERGY Flow“双色龙”光固化流动树脂填补气泡，改善边缘及邻接面密合度。

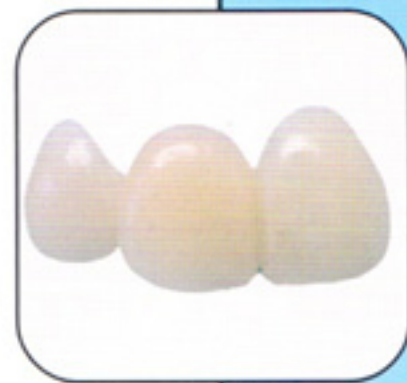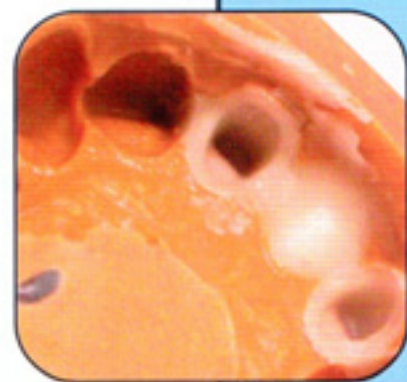

STEP BY STEP

Cool Temp[®]

N A T U R A L



订购信息:

- | | | | |
|------|--|------------|--|
| 5800 | Cool Temp Natural 自动调拌暂时冠 / 桥材料初始套装 | | |
| | Cool Temp Natural 暂时冠 / 桥材料 “弹药筒” 装 A2, A3.5 | 2 支 X 85g | |
| | 自动调拌头 (蓝色 / 细小) | 20 支 | |
| | SYNERGY Flow “双色龙” 流动树脂 A2/B2 | 1 支 X 2.3g | |
| | SYNERGY Flow “双色龙” 流动树脂 A3.5/B3 | 1 支 X 2.3g | |
| | 流动树脂注射头 | 4 支 | |
| | 操作说明书 | | |
| | SYNERGY Flow “双色龙” 光固化流动树脂补充装 | | |
| 8450 | A2/B2, 3 支注射头 | 1 支 X 2.3g | |
| 8451 | A3.5/B3, 3 支注射头 | 1 支 X 2.3g | |
| 8469 | 流动树脂注射头补充装 (已预弯) | 20 支 | |
| 6900 | Coltène/Whaledent 50/75ml 自动混合注射枪 | | |
| 7774 | 自动混合头 (蓝色 / 细小) | | |
| 7235 | Coltène 分离剂 (口内使用) | | |
| 5805 | Cool Temp Natural 自动调拌暂时冠 / 桥材料补充装 | | |
| | Cool Temp Natural 暂时冠 / 桥材料 “弹药筒” 装 A2 | 1 支 X 85g | |
| | 自动调拌头 (蓝色 / 细小) | 10 支 | |
| | 操作说明书 | | |
| 5810 | Cool Temp Natural 自动调拌暂时冠 / 桥材料补充装 | | |
| | Cool Temp Natural 暂时冠 / 桥材料 “弹药筒” 装 A3.5 | 1 支 X 85g | |
| | 自动调拌头 (蓝色 / 细小) | 10 支 | |
| | 操作说明书 | | |
| 5815 | Cool Temp Natural 自动调拌暂时冠 / 桥材料补充装 | | |
| | Cool Temp Natural 暂时冠 / 桥材料 “弹药筒” 装 A1 | 1 支 X 85g | |
| | 自动调拌头 (蓝色 / 细小) | 10 支 | |
| | 操作说明书 | | |

授权代理商:



Coltène AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten/ Switzerland
Tel. 0041/71/75 75 300
Fax 0041/71/75 75 301
E-mail: office@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, OH 44223/ U.S.A.
Tel. 001/330/916 8800
Fax 001/330/916 7077
http://www.coltenewhaledent.com

coltène
whaledent

瑞士康特齿科集团中国代表处
北京市海淀区北三环西路 43 号
青云当代大厦 1811 室 邮编: 100086
电话: (010) 6212 3251
传真: (010) 6212 3252
http://www.coltenewhaledent.com