



“金霸王”
牙体预备车针套装

feel the difference!

feel the difference!

designed to minimize ins



Inlay/Onlay Preparation Kit
嵌体 / 高嵌体预备套装



813-018-2 ML
快速、容易地去除银汞合金充填物。



806-016-2.5 ML
更小的头部直径有利于银汞合金完全磨除。



845R-025-4 ML
用于制备嵌体 / 高嵌体洞型的底部和轴壁，形成2mm的峡部、圆钝的内线角，以及理想的就位道。



836R-014-6 ML
平头圆柱形车针用于预备邻面箱状洞型，形成圆钝的内线角。



Porcelain Veneer Kit
瓷贴面预备套装



856-025-8 ML
标准粒度车针，用于在唇面预备之前磨除切缘部分。



834-021-6.8 ML
在唇面预备出0.5mm深度指示沟。834-016可预备出0.3mm深度指示沟，适用于下颌牙的贴面预备。



856-021-9 MLX
粗粒度的圆头锥状车针，适于快速磨除唇面深度引导沟之间的牙体组织。



856-014-9 ML
标准粒度车针，金钢砂磨削面长度为9mm，适于邻面区域的牙体预备。

前牙预备步骤



846-016-7ML
磨出深度指示沟
在切端作3个深度指示沟（下切牙可作2个）。在唇面沿切端指示沟往龈向，将唇面分为切1/2与龈1/2两个面，各作3个或2个深度指示沟。



846-016-7ML
磨出深度指示沟
在切端作3个深度指示沟（下切牙可作2个）。在唇面沿切端指示沟往龈向，将唇面分为切1/2与龈1/2两个面，各作3个或2个深度指示沟。



846-016-7ML
切缘磨除与唇面制备
按深度指示沟将切缘磨除。接着顺应唇面外形磨除唇面牙体组织，肩台也初步形成。



Crown & Bridge Kit
冠 / 桥预备套装


后牙预备步骤



880-014-6MLX
咬合面制备
先作出深度指示沟，然后根据咬合面的牙尖与斜面外形磨除指示沟之间的牙体组织。



878K-016-8ML
颊舌面制备
用878K-016-8ML在颊面作出深度指示沟，磨除指示沟之间的牙体组织，磨除舌侧的倒凹制备舌侧轴壁，并与颊面轴壁形成共同就位道。

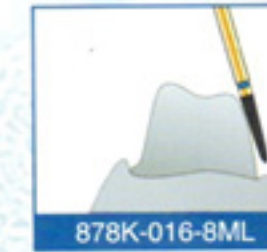


878K-016-8ML
颊舌面制备
用878K-016-8ML在颊面作出深度指示沟，磨除指示沟之间的牙体组织，磨除舌侧的倒凹制备舌侧轴壁，并与颊面轴壁形成共同就位道。



Microprep Kit
微创预备车针套装

- 专为最小侵入牙体预备方式设计，最大限度的保留牙体组织；
- 工作头更小，车针柄更为细长；
- 牙体预备时视野清晰，便于精确操作。

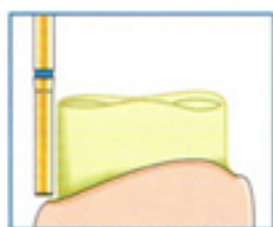

839-014 ML

末端切削肩台车针预备出精确、平整的底壁，形成清晰的邻接边缘。



845R-025-4 F

细粒度车针，用于修整、抛光预备体。



836R-014-6 F

细粒度圆柱形车针，预备出平滑的邻面箱状终止线。



862-016-8 XF

尖头火焰形特细粒度车针，用于预备体的再次抛光，并最终完成邻面和龈缘的修形。




379-023-5 XF

橄榄球形特细粒度车针，用于圆钝内部线角，完成预备体的最终修形。



379-023-5 XF

超细粒度金钢砂车针，用于圆钝预备体的锐利线角，也可用于最终修整咬合面及舌面。

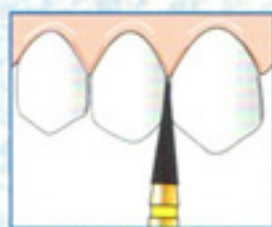

852-016-6 XF

超细粒度锥形车针，用于预备体的最终修整和抛光。



859-012-10ML

邻面制备
片切邻面，不可伤及邻牙。去除倒凹，两邻面间尽可能平行。




909-040-1.5ML

舌窝制备
均匀磨除舌窝处牙体组织。



881-012-8ML

磨出舌隆窝下轴壁
制备舌隆窝下轴壁，使之与唇面呈 1/2 轴壁接近平行。

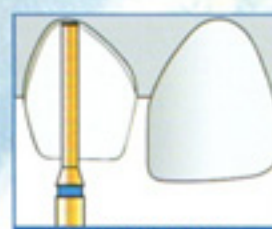

839-010-ML

修整边缘
将舌侧边缘与邻面边缘光滑地连续起来，去除悬釉及悬牙骨质。再用 839-010-ML 修整肩台。



856-016-8F

光滑轴面，圆钝点线角
将边缘以上轴壁的粗糙纹理磨平，并将点线角作稍许圆钝处理。



878K-010-8ML

邻面制备
片切邻接面。勿伤及邻牙，并使近远中邻面与颊舌面形成共同就位道。



878K-016-8F

修整轴面与边缘
用 878K-016-8F 修整四个轴壁的共同就位道，磨平粗糙纹理，圆钝线角，使四周肩台更加光滑、平整。颊面肩台换用 839-010-ML 进行修整，使之均匀、平整、光滑。



839-010-ML



368-023-5F

修整咬合面
修整咬合面，圆钝咬合面线角，略内收上颌颊尖与下颌颊尖，磨平粗糙纹理。



订购信息:



嵌体 / 高嵌体预备套装
货号 252000AA

	143	124	819	243	282	820	242	553	041
Fig. No.	813	806	845R	836R	839	845R	836R	862	379
ISO Ø 1/10 mm	018	016	025	014	014	025	014	016	023
Head L mm / Grit	2ML	2.5ML	4ML	6ML	ML	4F	6F	8XF	5XF
Grit Size	125 µm	125 µm	125 µm	125 µm	125 µm	45 µm	45 µm	25 µm	25 µm



瓷贴面预备套装
货号 252001AA

	190	191	454	864	436	041	405
Fig. No.	834	834	856	856	856	379	852
ISO Ø 1/10 mm	016	021	021	025	014	023	016
Head L mm / Grit	6.8ML	6.8ML	9MLX	8ML	9ML	5XF	6XF
Grit Size	125 µm	125 µm	150 µm	125 µm	125 µm	25 µm	25 µm



前、后牙冠 / 桥预备套装
货号 250065AA

	308	507	751	693	278	631	638	684	441	637	014
Fig. No.	846	859	909	881	839	878K	878K	880	856	878K	368
ISO Ø 1/10 mm	016	012	040	012	010	010	016	014	016	016	023
Head L mm / Grit	7ML	10ML	1.5ML	8ML	ML	8ML	8ML	6MLX	8F	8F	5F
Grit Size	125 µm	125 µm	125 µm	125 µm	125 µm	125 µm	125 µm	150 µm	45 µm	45 µm	45 µm



微创预备车针套装
货号 250027AA

	009	010 4.0	009 3.5	006	010	008 2.0
Fig. No.	801	830L	889	C1	C1	CC17
ISO Ø 1/10 mm	009	010	009	006	010	008
Head L mm / Grit	F	4F	3.5F			2
Grit Size	45 µm	45 µm	45 µm	Reg.	Reg.	Cross

Coltene/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten / Switzerland
Tel. 0041/71/75 75 300
Fax 0041/71/75 75 301
E-mail: info.ch@coltene.com

Coltene/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, OH 44223/ U.S.A.
Tel. 001/330/916 8800
Fax 001/330/916 7077
E-mail: info.us@coltene.com

瑞士康特齿科集团中国贸易公司
北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼
B座2单元1103-1104室 邮编: 100044
电话: (010) 62161985 62123251
传真: (010) 62123252
网址: www.coltenewhaledent.bj.cn

授权代理商:

