

# 打磨抛光条使用说明书

名称：打磨抛光条

规格：

产品名称	型号	产品描述	
		砂粒尺寸	尺寸
打磨抛光条	Roeko Abrasive Strips	40 $\mu$ m	长 10m
		60 $\mu$ m	长 10m
	Roeko Polishing Strips	30 $\mu$ m	长 10m
	Steel separating strips	-	宽 4mm
		-	宽 6mm
		-	宽 8mm

**材料及组成：**型号 Roeko Abrasive Strips 和 Roeko Polishing Strips 的基底材料为耐用聚酯，表面覆以氧化铝颗粒；型号 Steel separating strips 为氧化铝研磨颗粒电镀在不锈钢片上制成。

**适用范围：**产品用于邻间隙的抛光以及牙间隙的分离。

**使用说明：**

- 1) 根据修整、打磨形状的部位，选择合适粒度的本品，并裁下适当的长度。
- 2) 将本品插入牙缝之间，用手操作打磨。
- 3) 将抛光条夹在牙缝之间，仅从唇侧露出抛光条的一小节，用手指在舌头一侧推着，使用所裁抛光条的全部长度进行打磨。
- 4) 本品用过之后，不能再次使用，要妥善进行废弃处理。

**注意事项：**

- 1) 注意：在使用本品中，切勿伤及患者的口腔内部以及颜面。
- 2) 将本品从分配器中拉出时，注意不要擦伤手指。另外，为了避免手术者伤及手指，请操作时带上手套。
- 3) 在使用本品时，如果过于用力，会伤及患者的牙龈，务必适度操作。
- 4) 在使用本品时，不要过于用力，以免打磨过度。

**其他：**无

**禁忌症：**无

**标签、标识的图形、符号、缩写的解释：**无

**储存方法：**常温

**有效期：**长期

**注册号:** SFDA(I)20121633058

**执行标准:** YZB/GER 3722-2012 《打磨抛光条》

**生产厂家:** Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

**地址:** Raiffeisenstraße 30 89129 Langenau Germany

**联系电话:** +49 0 7345 805 0

**中国售后服务机构:**

**公司名称:** 康特威尔登特齿科贸易（北京）有限公司

**地址:** 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼2门1103-1104室

**电话:** 010-62123251

**传真:** 010-62123252

**电子邮箱:** ychen@coltenewhaledent.com