

牙科成形片使用说明书

名称：牙科成形片

规格：

型号	厚度 (mm)	宽度 (mm)	长度 (m)
Roeko Matrix band soft	0.05	5	3
		6	3
		7	3
Roeko Strip	/	/	/
Matrix band regular	0.03	5	3
		6	3
		7	3
	0.05	5	3
		6	3
		7	3

材料及组成： 型号Matrix band regular由不锈钢材料制成；Roeko Matrix band soft为退火不锈钢制成；型号Roeko Strip由聚酯薄膜材料制成。

适用范围： 适用于牙科成形片，产品用于辅助前后牙直接充填。

使用说明：

- 1 使用时首先需要选取宽度合适的成形片。
- 2 最好在同名牙上试一下成形片的长度（如果同名牙完整的话）。
- 3 修剪成形片的长度，使得成形片的边缘不会压迫牙龈。
- 4 处理需要充填恢复的牙面。
- 5 将光固化材料放入成形片中，注意不要产生气泡。
- 6 将成形片放在需要充填治疗的牙齿上，完全就位。
- 7 把切角和边缘修整抛光，去除多余的光固化材料。
- 8 轻轻去除成形片，抛光光固化材料。

注意事项： 型号的选择。

其他： 无

禁忌症： 无

标签、标识的图形、符号、缩写的解释： 无

储存方法： 常温

有效期：长期

注册号：SFDA(I)20121063059

执行标准：YZB/GER 3724-2012《牙科成型片》

生产厂家：Coltene/Whaledent GmbH + Co.KG

地 址：Raiffeisenstraße 30 89129 Langenau Germany

联系电话：+49 0 7345 805 0

中国售后服务机构：

公司名称：康特威尔登特齿科贸易（北京）有限公司

地 址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼2门1103-1104室

电 话：010-62123251

传 真：010-62123252

电子邮箱：ychen@coltenewhaledent.com