

【产品名称】牙科橡皮障楔线 (Dental Dam stabilizing cord)

【注册证号】SFDA(I)20121630750

【产品标准】YZB/USA 0291-2012 《牙科橡皮障楔线》

【成份】天然乳胶，染色剂，辅料

【规格】2.3m/盒，颜色分为超小号（蓝色）、小号（黄色）和大号（桔黄色）

【型号】WEDJETS

【适应症】口腔科治疗使用橡皮障时，将楔线塞于两牙之间以固定橡皮障。

【使用方法】

为了固定橡皮障，只需放置 1 条大约 4CM 长的 WEDJETS 型牙科橡皮障楔线于牙缝末端，放置完成后，楔线长度可用剪刀调节。

【注意事项】

使用水溶润滑剂有助于放置 WEDJETS 型牙科橡皮障楔线。

【禁忌症】对天然乳胶过敏者慎用。

【贮藏】

勿使用超过外包装上标注日期的产品。

储存温度低于 25°C。

【有效期】2 年

【生产企业】

Coltene/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway Cuyahoga Falls, OH 44223 United States

【售后服务】

康特威尔登特齿科贸易（北京）有限公司

北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 2 门 1103-1104 室

电话：010-62123251

传真：010-62123252