

ROEKO

Gingiva Liquid

使用说明书

适应症：

Gingiva Liquid是一种氯化铝水溶液。在实际的牙齿制备或印模的过程中，该产品在牙齿制备或取印模过程中，与排龈线一起使用进行排龈止血。

组成：

1ml的水溶液中包含100mg的氯化铝。

型号：无。

预期用途：

使用剂量涂布器对干燥、未浸染的所需长度的排龈线彻底进行湿润。牙齿制备和干燥过后，将排龈线紧紧环绕在牙齿颈部，然后使用一个较小的排龈线封隔器或抹刀将其小心放入牙槽。

在以下印模制备过程中，由铝盐效果支撑排龈线的机械功能，会导致牙龈明显回缩。经过约1-3分钟，打开牙槽，在制备过程中造成的出血就会停止。这样，在取出排龈线后，可立即进行印模，特别是对宫颈制备边缘进行印模。

在印模后，经Gingiva Liquid处理过的区域应使用清水重冲洗。

禁忌症：

在患有急性牙龈炎或急性坏死性溃疡性牙龈炎的情况下，不应使用Gingiva Liquid。在发炎区域使用Gingiva Liquid时应谨慎考虑风险和益处，因为牙龈缘回缩可能会在一定程度上导致组织损伤。

与其他药物的相互作用：

如果与碱性反应物质或磷酸盐接触可能发生凝固反应。明胶制剂会变黑。

注意：

因为含有氯化铝，所以Gingiva Liquid带有一点苦味。

警告:

请将该产品放在儿童接触不到的地方。

使用和储存:

- 仅限一次性使用
- 仅限牙科使用
- 使用后必须立即封闭包装。应储存在干燥的暗处，温度应低于25℃。
- 产品有效期为3年。打开产品后，应在使用期限前使用完毕。请勿在超出产品标签和包装上的过期日期后使用。

规格:

10ml溶液

REF524000

最后一次信息修改时间:

2012年09月

生产企业

名称: Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

注册地址: Raiffeisenstrasse 30, 89129 Langenau, Germany

生产地址: Raiffeisenstrasse 30, 89129 Langenau, Germany

售后服务

名称: 康特威尔登特齿科贸易(北京)有限公司

地址: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼2门1103-1104室

电话: 010-62161985

传真: 010-62123252

执行标准编号: YZB/GER 1647-2015

注册证书编号: 国械注进 20153631758